

# cover.



## PLEJEANVISNING OG RENGØRING

Tak fordi du har valgt et GREINER produkt fra Scan-Med A/S.

GREINER's betræk fås i to udgaver, "**Compact**" og den innovative "**Premium**", som sætter nye standarder med sin superbløde og utrolig slidstærke overflade.

Begge materialer opfylder kravene til komfort og udseende, og til den daglige rutine med holdbarhed, rengøring og desinfektion.

Med regelmæssig pleje af betrækkene, vil begge typer holde i mange år fremover. Brug evt. [CARISMA](#) plejesættet for at forlænge levetiden herpå.

**Rengøring:** Olie, fedtstoffer, blæk, blod, urin og organiske syrer skal straks renses af med en fugtig mikrofiberklud.

Brug lunkent vand eller varmt, mildt sæbevand, brug ikke opløsningsmidler. Undgå klorider og kemiske rengøringsmidler.

**Desinfektion:** til aftørningsdesinfektion med overfladedesinfektionsmiddel anbefales universalklud, Wet Wipe.

Pletter og misfarvning forårsaget af f.eks. jeans eller andre tekstiler er ikke dækket af producentens garanti.

**Egenskaber:** Holdbar, biokompatibel, ridse- og snavssikker, modstandsdygtig over for varme, desinfektionsmiddel, urin og blod.



**Brandhæmmende middel:**

FMVSS 302, DIN EN 1021 1+2 m.fl

**Slidstyrke:** testet iht Martindale;

> 100.000 cyklusser (*Compact*)

> 300.000 cyklusser (*Premium*)

Mindre afvigelser i farve og struktur er produktionsrelateret og kan ikke udelukkes.

# compact.

compact. Producentens anbefalede desinfektionsmidler		
Bode Chemie GmbH:	Bacillol AF / Cutasept / Mikrobac forte	✓
Braun:	Meliseptol Foam Pure / Softasept N / Meliseptol / Heliapur / Melsitt / Melsept	✓
Desomed:	Desomed Rapid	✓
Dr. Schumacher:	Descosept AF	✓
Ecolab:	Incidin foam / Incidin Plus / Incidin perfekt / Incidin liquid	✓
Favodent Karl Huber:	Flora quick	✓
Henkel:	Incidur-Spray	✓
Lysoform:	Fugaten Spray	✓
Orochemie:	B45	✓
Pepler:	Micro clean / Pepp clean	✓
Reckitt Benckiser:	Sagrotan med	✓
Schülke & Mayr:	Kodan Tinktur Forte / Esemfix / Octenisept / Mikrozyd AF	✓
Unident:	Unisepta foam	✓

Den højeste anbefalede koncentration blev testet ved 50 påførsler hver.

Brugsanvisningen til rengøring skal overholdes i alle tilfælde. Undgå hyppigt skift i rengøringsmaterialer, da dette i nogle tilfælde kan forkorte betrækkets levetid.

Ved regelmæssig og længere tids brug af produkter der indeholder alkohol eller opløsningsmidler, vil betrækkets overflade kunne påvirkes negativt, og materialeskørhed vil kunne forekomme.

Garanti bortfalder ved brug heraf.

# premium.

premium. Producentens anbefalede desinfektionsmidler		
Bode Chemie GmbH:	Kohrsolin	✓
Desomed:	Desomed Rapid	✓
Dr. Schumacher:	Cleanisept wipes	✓
Ecolab:	Brial	✓
Schülke & Mayr:	Antifect plus / Buraton rapid / Mikrozyd AF liquid	

*Da betrækket stadig er forholdsvist nyt, er der derfor kun testet et mindre antal desinfektionsmidler herpå – flere tests følger løbende.*

Lakprodukter, stærke rengøringsmidler xylenebaserede opløsninger, acetone eller MEK, forårsager øjeblikkelig skade og bidrager til nedbrydning af materialet. Brug af sådanne midler er på egen risiko og hører ikke under garantien.

For at kontrollere brug af desinfektionsmidler og påvirkning af betrækket, foreslås det at prøve på et ikke-synligt sted først.

Producenten er ikke ansvarlig over for misfarvninger forårsaget af eksterne kontaminanter.

Perfekt pleje beskytter betrækket.



GREINER GmbH  
Wettestraße 1 · 74385 Pleidelsheim · Germany T +49  
7144 81120 · F +49 7144 8112 99  
info@greiner-gmbh.de · www.greiner-gmbh.de

**Scan-Med a|s**

Scan-Med A/S • Dalgårdsvej 17 • 8220 Brabrand  
Tlf. 86 10 61 66  
www.scan-med.dk | e-mail: scan-med@scan-med.dk